

# UV 렌즈세척기



UV ULTRASONIC CONTACTLENS CLEANER



오아 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 사용설명서를 충분히 숙지 후 제품을 사용하시고, 찾기 쉬운 곳에 보관하십시오.



# UV 렌즈세척기

오아 | OUSC-002IV

---

## 목차

---

주의 사항	01-02
제품 구성	03
제품 명칭	04
사용 방법	05
충전 방법	06
세척 방법	07
제품 사양	08
회사 정보	08

---

---

## 주의 사항

---



- 설명서에 안내된 내용과 용도로만 사용하십시오. 사용자의 임의적인 사용에 따른 사고에 대해서는 보상받을 수 없습니다.
- 본 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에서는 사용하지 마십시오.
- 본 제품 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 파손의 위험이 있습니다.



- 본 제품을 절대 임의로 분해 및 조립하지 마십시오. 임의 분해 조립으로 인한 고장 시 소비자 과실로 수리가 불가능하거나, 유상 A/S만 가능합니다.



- 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하시기 바랍니다.
- 어린이 또는 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오.
- 사용 중 불편함이 있을 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- 포장 비닐은 질식의 위험이 있습니다. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.



- USB-C 케이블 및 충전단자가 손상된 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- 제품 정격에 맞게 연결해 주십시오.
- USB-C 케이블을 무리하게 구부리거나 묶은 상태로 사용하지 마십시오.
- USB-C 케이블을 분리할 때는 잡아 당기면서 분리하지 마십시오.

---

## 주의 사항

---



- 본 제품 청소 시에는 화학 약품을 사용하지 마시고, 젖은 헝겊 등으로 가볍게 닦아 낸 후 마른 헝겊으로 물기를 제거하십시오.
- 본 제품 청소 시에는 설명서 [세척방법]을 참고해 주십시오.



- 본 제품은 방수 제품이 아닙니다. 사용 시 주의해 주십시오.
- 본 제품 사용 시 최대한 물 주변에서의 사용을 자제해주시고, 주변에 욕조, 싱크대 등 빨려 들어갈 수 있는 곳, 떨어질 수 있는 곳에 놓지 마십시오.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단한 후 물이 닿지 않게 보관하십시오.
- 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



- 본 제품을 사용하지 않을 때 전원을 반드시 차단하십시오.
- 뽀족하거나 날카로운 물건을 가까이 두고 보관하지 마십시오.
- 본 제품 보관 시 직사광선을 피해 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 평평한 곳에서 보관하시고, 높은 장소에서의 보관은 자제하십시오.
- 장시간 미사용 시 변색이 될 수 있으니 사용 후 깨끗이 닦아 보관하십시오.
- 본 제품을 사용 및 보관하실 때에는 난방기(라디에이터, 스토브 또는 열 발생시키는 기기) 등의 열 발생 장치와 멀리하십시오.



- 수명이 다 된 제품은 지정된 재활용품 수거 장소에 분리 배출하십시오.
- 제품 패키지의 분리배출 기호를 확인하여 분리배출해 주십시오.  
\* 분리배출방법은 각 지자체의 분리배출방법을 참고하여 주십시오.



- 본 제품은 자외선이 방출됩니다.
- 노출 시 눈 또는 피부를 자극할 수 있습니다.
- 적절한 차폐물을 사용해 주십시오.

## 제품 구성



본품



흡입봉



렌즈 집게



렌즈통



파우치





USB-C 케이블



사용설명서

## 제품 명칭

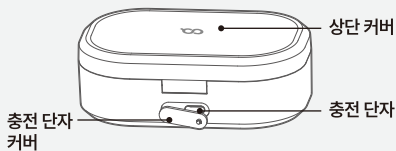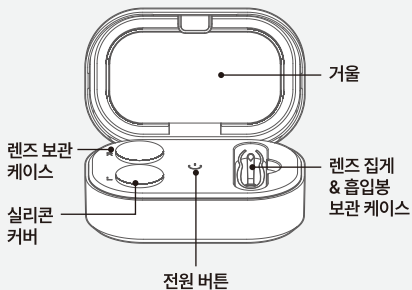


---

## 사용 방법

---


- 상단 커버를 열고, 실리콘 커버를 열어 주십시오.
  - 사용한 렌즈를 렌즈 보관 케이스에 넣어 주십시오.
  - 렌즈 보관 케이스에 세척액을 넣어 주십시오.
  - 실리콘 커버를 닫아 주십시오.
  - 전원 버튼을 길게 터치하면 전원이 켜지고, UV 세척이 3분 동안 작동 됩니다.
  - UV 세척 시 전원 버튼을 짧게 터치하면 일반 세척이 3분 동안 작동 됩니다.
  - 동작 중 전원 버튼을 길게 터치하면 전원이 꺼집니다.
- ※ 렌즈를 넣을 때 왼쪽과 오른쪽을 분리해서 넣어 주십시오.
- ※ 세척액이 흐르지 않도록 실리콘 커버를 꼭 닫고 사용해 주십시오.
- ※ UV 세척 시 상단 커버를 꼭 닫고 사용해 주십시오.

## 충전 방법

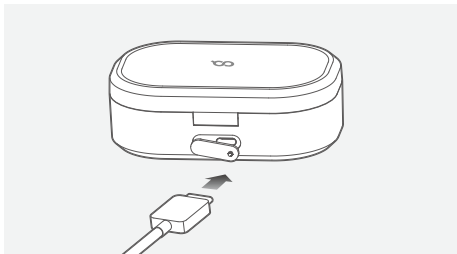

- 충전 단자 커버를 열어 주십시오.
  - 동봉된 USB-C 케이블을 충전기에 연결한 뒤 충전 포트와 연결해 주십시오.
  - 충전 중에는 전원 버튼에 빨간색 LED가 점멸 됩니다.
  - 충전 완료 시에는 상태표시등에 빨간색 LED가 소등 됩니다.
  - 충전 시간 : 3시간
- ※ 충전 단자 커버는 빠지지 않습니다. 찢어지지 않도록 주의해 주십시오.  
※ 본 제품의 정격은 '5V, 1A'입니다. 정격에 맞는 어댑터를 사용해 주세요.  
※ 본 제품은 충전 중 사용이 불가합니다.

## 세척 방법

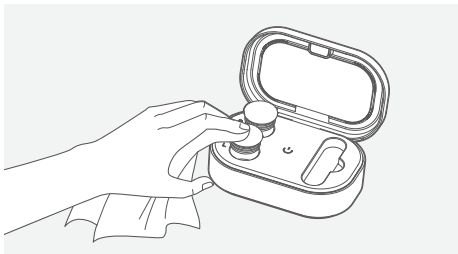

- 본품에 오염 및 이염이 있는 부분은 소량의 물을 적신 천 등을 이용해
  - 가볍게 닦아낸 후 마른 헝겂, 천 등을 사용해 물기를 제거해 주십시오.
  - 세척 후에는 서늘한 곳에서 자연 건조해 주십시오.
- ※ 화학 약품 등으로 제품을 세척하지 마십시오.

## 제품 사양

상품명	오아 UV렌즈세척기
모델명	OUSC-002IV
크기	100 × 68 × 33 (mm)
무게	112g
정격	5V, 1A / 5W
배터리 용량	DC 3.7V, 1100mAh, 4.07Wh
구성품	본품, 흡입봉, 렌즈 집게, 파우치, 렌즈통, USB-C 케이블, 사용설명서

\* 제품 성능 개선을 위하여 약간의 규격 변동이 있을 수 있습니다.

## 회사 정보

수입원	오아 주식회사
주소	서울시 서초구 효령로46길 97 (* 해당 주소로 고객센터 접수없이 제품 먼저 발송 시 분실 위험이 있습니다.)
A/S 및 제품문의	1661 - 4555 (* A/S 요청 시 고객센터를 통해 먼저 접수해 주시기 바랍니다.)
제품 보증기간	구매일로부터 1년이며, 택배비는 고객님 부담입니다. (단, 보증기간 이내에도 소비자 과실로 인한 수리 사유 시 유상 A/S만 가능합니다. / 택배비 별도)
홈페이지	oa-mall.co.kr



오아에서 원하시는  
상품을 찾아보세요



## 오아 주식회사

주소 서울시 서초구 효령로46길 97

A/S 및 제품문의 1661-4555

홈페이지 [oa-mall.co.kr](http://oa-mall.co.kr)

Copyright 2024. OA Co., Ltd. All right reserved.

본 사용설명서의 콘텐츠 저작권은 오아에 있으므로 무단 사용을 금지합니다.

250227\_OUSC-002IV\_UV렌즈세척기\_설명서\_HM\_V1